




UPUTSTVO ZA APLIKACIJU VIZUELNIH UŠNIH MARKICA KOD OVACA I KOZA



Ovce i koze se obeležavaju sa dve identične ušne markice u oba uвета ili sa jednom vizuelnom i jednom EID markicom u desnom uvetu. Proveriti ispravnost aplikatora i adaptera.

Ženski deo ušne markice ima jedno ispupčenje i ono se stavlja u čeljusti aplikatora okrenuto ka spolja. Adapter je postavljen na svoje mesto u aplikatoru.


Voditi računa da je ženski deo markice uvek postavljen u unutrašnjoj strani uha. Greške u ovoj fazi dovode do pogrešnog postavljanja ušne markice.

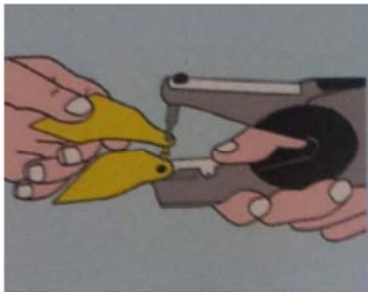

Navući muški deo ušne markice na metalnu iglu aplikatora.



Pre postavljanja ušne markice obavezno potopiti aplikator u antiseptični ili dezinfekcioni rastvor. Na ovaj način se sprečava pojava infekcije na mestu aplikacije i potpomaže zarastanje nastale rane na uvetu.

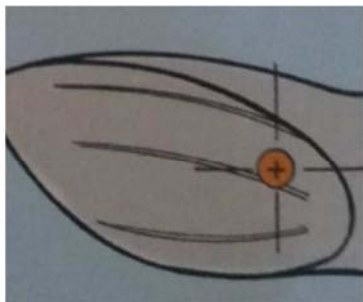

Pravilno pozicionirana markica se postavlja sa umerenom ali odlučnom silom i to tako da je muški deo markice uvek postavljen na spoljašnjoj strani uвета. Zvuk klik označava da je markica postavljena.

Pravilno postavljena ušna markica se nalazi u sredini bliže bazi uвета.



Nakon postavljanja ušnu markicu treba okrenuti za četvrtinu kruga prvo u desnu stranu a zatim u levu stranu, što će pomoći zaceljivanju rane. Takođe voditi računa da postoji slobodan prostor između markice i tkiva čime se omogućava prisustvo vazduha samoj rani.

