



## UPUTSTVO ZA APLIKACIJU ELEKTRONSKIH UŠNIH MARKICA SA TRANSPONDEROM

### KOD GOVEDA





Proveriti ispravnost aplikatora i adaptera.



Ženski deo ušne markice je ujedno deo sa elektronskom opremom i on ima jedno ispupčenje sa donje strane.

Važno je pravilno postaviti markicu u aplikator i to tako da je ispupčenje na markici usmereno ka spolja u odnosu na čeljusti aplikatora.


Greške u ovoj fazi dovode do pogrešnog postavljanja ušne markice sa transponderom.

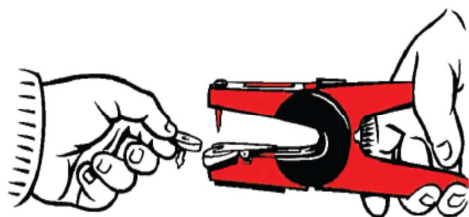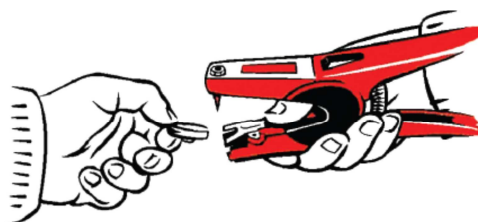

Navući muški deo ušne markice na metalnu iglu aplikatora.



Pre postavljanja ušne markice obavezno potopiti aplikator u antiseptični ili dezinfekcioni rastvor. Na ovaj način se sprečava pojava infekcije na mestu aplikacije i potpomaže zarastanje nastale rane na uvetu.

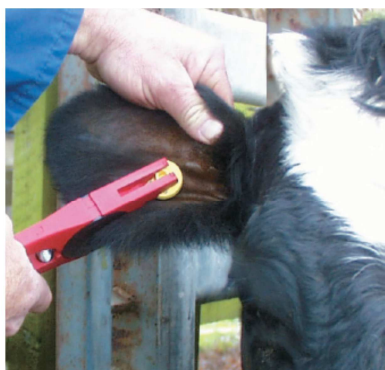

Pravilno pozicionirana markica se postavlja sa umerenom ali odlučnom silom i to tako da je muški deo markice uvek postavljen na spoljašnjoj strani uveta, dok elektronski deo markice ustaje u unutrašnjosti uha.

Pravilno postavljena ušna markica



Pogrešno postavljene ušne markice